



ResMed


| Healthcare



AirTouch™
Maskenkissen

Samtweich

Erfahren Sie mehr

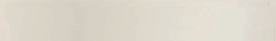

Damit Sie lange etwas von Ihrem AirTouch™ Maskenkissen haben

Der UltraSoft™ Memory Schaum Ihres AirTouch-Maskenkissens ist unglaublich weich. Damit Sie lange daran Freude haben, sollten Sie ein paar Grundregeln beachten – und scheuen Sie nicht den Austausch, wenn es deutliche Gebrauchsspuren aufweist.



Entsorgen Sie beschädigte Kissen



Tauschen Sie es aus, wenn sich Gebrauchsspuren zeigen



Nur mit alkoholfreien Tüchern reinigen



Trocken aufbewahren und von Feuchtigkeiten fernhalten



Nicht der direkten Sonne aussetzen



Keine Haushaltsreiniger oder Haushaltsreinigungsgaräte benutzen



Keine alkoholhaltigen Tücher verwenden



Nicht in Flüssigkeiten tauchen



AirTouch™ N20



AirTouch™ F20

Vertrieb durch: ResMed GmbH & Co. KG, Fraunhoferstraße 16, 82152 Martinsried, Telefon +89 9901-00, E-Mail reception@resmed.de
AirTouch und UltraSoft sind Warenzeichen und/oder registrierte Warenzeichen der ResMed Firmengruppe.

© 2020 ResMed GmbH & Co. KG, **Art.-Nr. 10110576** / 2, Obj.-ID. C250546 - 2 · 07 20