

## Anleitung zum Anlegen der AirFit N30i & P30i



1 Ziehen Sie den Rahmen und das Kopfband über den Kopf, sodass sich das Kniestück oben und das Kopfband hinter Ihrem Kopf befindet.



2 Halten Sie das Maskenkissen/Nasenpolster unter Ihre Nase.



3 Passen Sie das Kopfband an, bis das Maskenkissen/Nasenpolster bequem unter der Nase anliegt.



4 Drücken Sie auf die seitlichen Knöpfe am Kniestück, um es zu lösen. Verbinden Sie dieses mit dem Schlauch des Geräts und dann wieder mit dem Rahmen.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Gebrauchsanweisung.



### Zusätzliche Optionen

- Bei längerem Haar empfehlen wir, das Haar hinten über das untere Kopfband zu führen. Wenn die Haare zum Pferdeschwanz gebunden sind, sollte der Ansatz weit genug oben sein, sodass er bequem über dem unteren Kopfband sitzt.
- Weitere Anleitungen sowie umfassende Informationen zu Verwendungszweck und Gegenanzeigen sowie Warn- und Vorsichtshinweise finden Sie in der Gebrauchsanweisung.



**Für die aktiven Schläfer,** die ins Bett gehen, wenn sie möchten, zwischendurch aufstehen, sich hin und her drehen und morgens aus dem Bett springen, um den neuen Tag zu beginnen.



## Freiheit für Bewegung

Die AirFit™ N30i und P30i von ResMed mit dem Schlauchanschluss oben geben Ihren Patientinnen und Patienten die Freiheit, ihre Schlafposition beliebig zu wählen und sich so zu bewegen, wie es ihnen gefällt.

Dank des modularen Aufbaus kann das N30i-Maskenkissen und das P30i-Nasenpolster mit demselben Rahmen verwendet werden, während der optional\* erhältliche QuietAir™-Luftauslass für eine sanfte Diffusion der ausgeatmeten Luft und damit für eine ruhige Schlafumgebung sorgt.



1 ResMed external 7-day clinical study of 24 ResMed and non-ResMed patients, conducted between 21/02/2018 - 12/03/2018. Data on file; ID A4320645.  
2 ResMed external 14-day clinical study of 23 ResMed patients, conducted between 30/05/2018 - 22/06/2018. Data on file; ID A4387859.  
3 Sound power level of 21 dBA – refer to AirFit N30i/P30i user guide.

\* keine Kassenleistung  
\*\* im Lieferumfang enthalten: Maske inkl. Kopfband, Rahmen Small, Nasenpolster S & M.  
\*\*\* im Lieferumfang enthalten: Maske inkl. Kopfband, Rahmen Standard und Nasenpolster S & M.




Vertrieb durch: ResMed Deutschland GmbH, Haferwende 40, 28357 Bremen, Tel 0421 48993-0, Fax 0421 48993-10, E-Mail info@resmed-deutschland.de.  
AirFit und QuietAir sind Marken der ResMed Unternehmensgruppe. Technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden.  
© 2021 ResMed, Art.-Nr. 10111007/2 Obj.-ID. C263912 2 - 02 21

## Entspricht den Wünschen und Bedürfnissen

Das spezielle Design der N30i und P30i ist besonders für aktive Schläfer geeignet und ermöglicht das Schlafen in einer beliebigen Position – ganz ohne Kompromisse bei der Abdichtung oder dem Komfort. Dank passgenauem Rahmen mit dem Schlauchanschluss oben macht die Maske jede Drehung und Wendung zuverlässig mit. Und durch den Schnellverschluss des Kniestücks ist auch nächtliches Aufstehen kein Problem.

## Mehr Freiheit und Flexibilität – und doch so einfach

AirFit N30i und AirFit P30i Masken sind modular aufgebaut, ganz nach dem Motto: weniger ist mehr. Dies ermöglicht einen einfachen und schnellen Wechsel zwischen dem N30i-Nasenflügelkissen und dem P30i-Nasenpolster, je nach Vorliebe für Sitz und Auflagebereich.

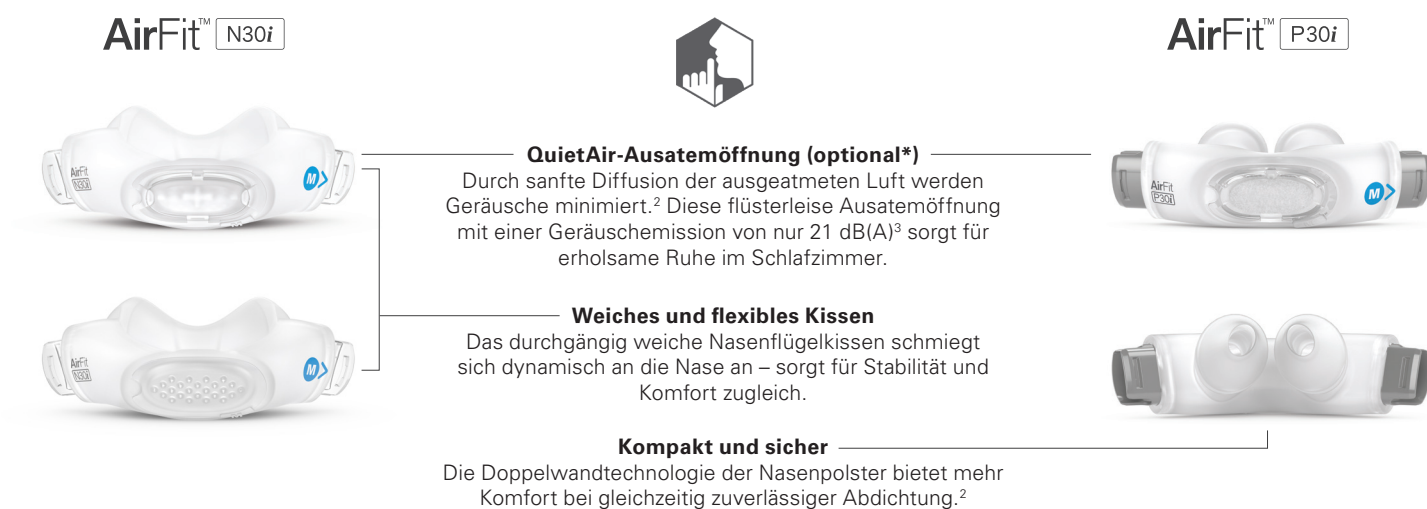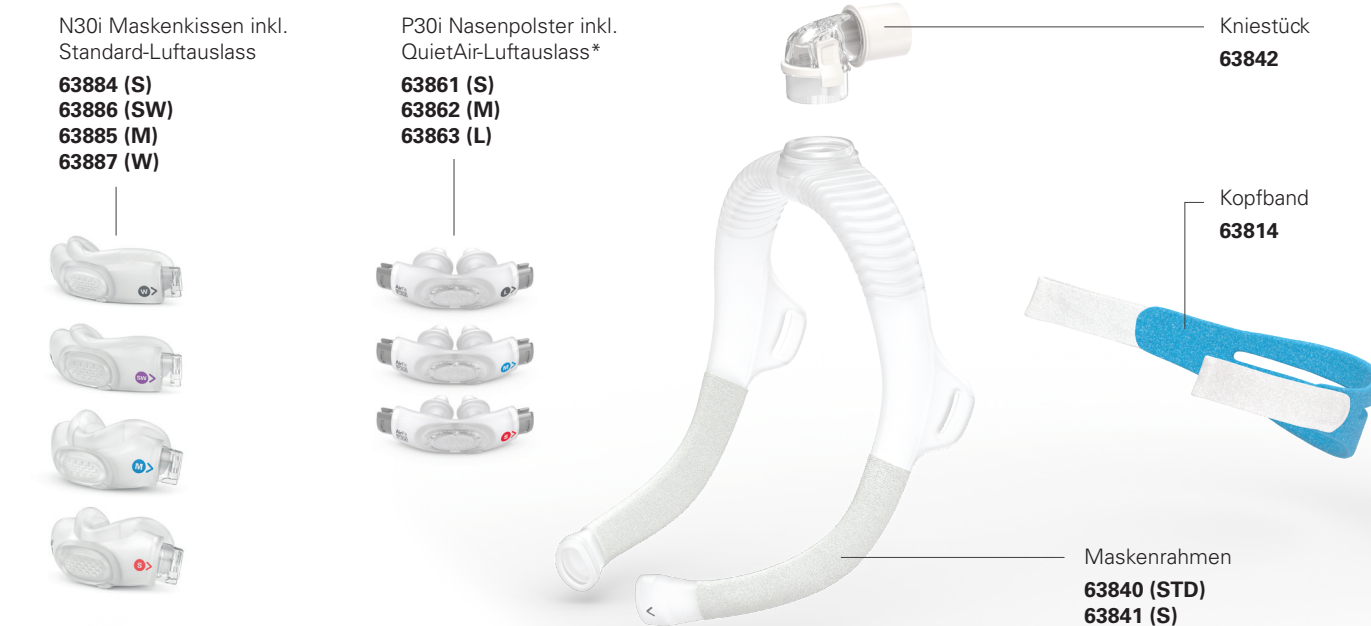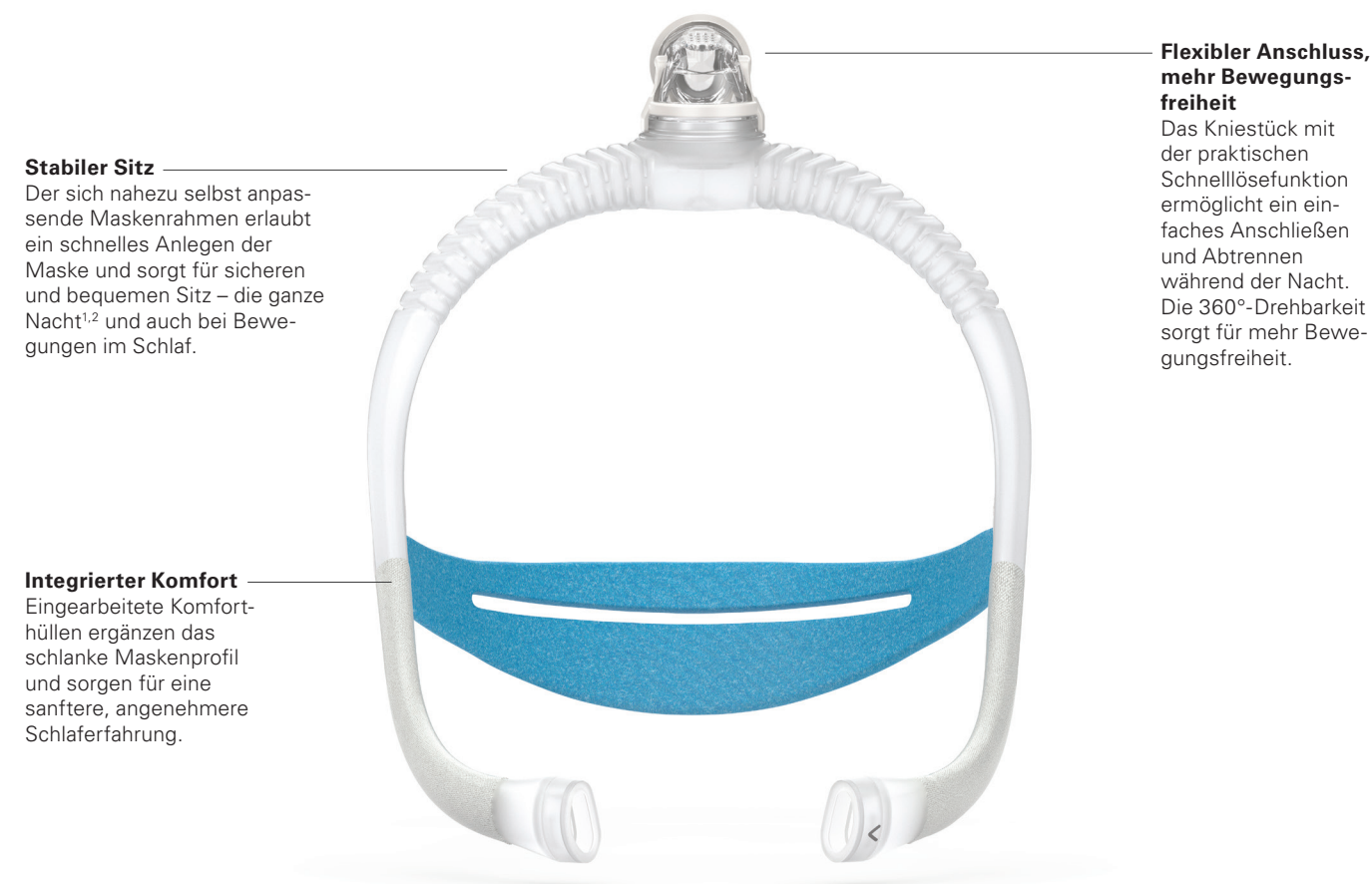

| Größe                       | AirFit N30i Maskensysteme |                        |                         |                         | AirFit P30i Maskensysteme |                              |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                             | Kissen S/<br>Rahmen S     | Kissen SW/<br>Rahmen S | Kissen M/<br>Rahmen STD | Kissen W/<br>Rahmen STD | Starter-Paket<br>Small**  | Starter-Paket<br>Standard*** |
| inkl. Standard-Luftauslass  | 63880                     | 63881                  | 63882                   | 63883                   | –                         | –                            |
| inkl. QuietAir-Luftauslass* | 63817                     | 63818                  | 63819                   | 63820                   | 63866                     | 63865                        |

## Tipps zur Größenbestimmung bei der AirFit N30i Maske

Die Maskenkissen der AirFit N30i sind in vier austauschbaren Größen erhältlich: Small, Medium, Small Wide and Wide.

Durch das modulare Design der AirFit N30i lassen sich alle Kissen Größen und -varianten mühelos in die verschiedenen Rahmengrößen einrasten, d. h. ein schneller Wechsel des Kissens ist ganz flexibel und unkompliziert möglich.

Wir empfehlen die Verwendung der Anpass-Schablone, um die am besten geeignete Größe zu bestimmen.

