

## Quattro™ Air – Komponentenkarte



Quattro Air Kopfband  
**62757 Small**  
**62756 Standard**



Quattro Air *for Her* Kopfband  
**62758 Small**  
**62759 Standard**



Kniestück mit Entriegelungs-  
knöpfen  
**62762**



Maskenrahmen  
**62760 (XS/S)**  
**62761 (M/L)**



Maskenkissen  
**62736 (XS)**  
**62737 (S)**  
**62738 (M)**  
**62739 (L)**

### Artikelnummern

Quattro Air Maskensystem Small	62705
Quattro Air Maskensystem Medium	62706
Quattro Air Maskensystem Large	62707
Quattro Air <i>for Her</i> Maskensystem Extra Small	62743
Quattro Air <i>for Her</i> Maskensystem Small	62744
Quattro Air <i>for Her</i> Maskensystem Medium	62745

**Quattro™ Air**  
**Quattro™ Air *for Her***  
 FULL FACE MASKE

## Quattro™ Air – Anpassungsleitfaden



- Nehmen Sie das Kniestück von der Maske ab, indem Sie auf die seitlichen Entriegelungsknöpfe drücken und das Kniestück abziehen.
- Ziehen Sie das Kopfband mit geöffneten unteren Kopfbändern über den Kopf.



- Ziehen Sie die beiden Bänder des oberen Kopfbands gleichmäßig stramm bis die Maske fest sitzt.



- Führen Sie die unteren Bänder unter Ihren Ohren entlang und schieben Sie die Bänder über die unteren Kopfbandschlaufen am Maskenrahmen.



- Ziehen Sie die oberen Kopfbänder gleichmäßig an, bis die Maske fest sitzt.
- Die Maske sollte fest, aber bequem und sicher sitzen.
- Nicht zu fest anziehen!



- Verbinden Sie das Kniestück mit dem Atemschlauch des Geräts.
- Bringen Sie das Kniestück an der Maske an, indem Sie auf die seitlichen Entriegelungsknöpfe drücken und das Kniestück in die Maske drücken.
- Schalten Sie das Gerät ein.



- Lösen Sie die Klettverschlüsse an den oberen Kopfbändern.
- Ziehen Sie beide Bänder gleichmäßig gerade so stramm, dass eine Abdichtung erzielt wird und befestigen Sie die Laschen wieder.
- Ihre Maske ist nun gebrauchsfertig.



Quattro Air for Her ist so gestaltet, dass die Haare über oder unter dem Kopfband getragen werden können.

**Quattro™ Air**  
**Quattro™ Air for Her**  
FULL FACE MASKE

Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung der Quattro Air Full Face Maske.

**Vertrieb durch:** ResMed Deutschland GmbH, Haferwende 40, 28357 Bremen, Tel 0421 48993-0, Fax 0421 48993-10, E-Mail [info@resmed-deutschland.de](mailto:info@resmed-deutschland.de)

**Vertrieb durch:** ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA. **[CE/REP]** ResMed (UK) Ltd. 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK. Informationen zu weltweiten Geschäftsstellen von ResMed finden Sie auf unserer Website unter [www.resmed.com](http://www.resmed.com). Quattro Air ist eine Marke der ResMed Ltd. und ist beim Patent- und Markenamt in den USA registriert. © 2013 ResMed Ltd. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. 1016035/1 2013-05.