



i BESTANDTEILE DER MASKE

Auf der Innenseite des Umschlags finden Sie eine Abbildung der Maske.

- | | |
|------------------|----------------------------|
| A Silikonauflage | E Winkelstück |
| B Maskenrahmen | F Drehgelenk |
| C Kopfband | G Rahmenbasis |
| D Kopfband-Clips | H Ausatemluft-Verteilerpad |

Hinweis: Bei einer Verwendung zu Hause dürfen das Winkelstück E und die Kopfband-Clips D nicht abgenommen werden. Werden diese Teile versehentlich abgenommen, finden Sie auf der Seite „Technische Daten“ Anweisungen zum Zusammenbau.

ii ANPASSEN DER MASKE

1. Entfernen Sie vor dem Gebrauch der Maske das gesamte Verpackungsmaterial.
2. Halten Sie die unteren Bänder des Kopfbands C so, dass der Maskenrahmen B nach unten zeigt.
3. Ziehen Sie das Kopfband C über den Kopf, sodass die Silikonauflage A auf Ihrer Stirn anliegt.
4. Greifen Sie die unteren Bänder an den Seiten des Maskenrahmens B und ziehen Sie die Bänder nach unten und zur Seite hin fest. Vergewissern Sie sich, dass die Silikonauflage A auf Ihrer Nase anliegt und dass das blaue obere Band über Ihre Stirn verläuft.
5. Ziehen Sie die Kopfbandbänder des Kopfbands der Maske C vorsichtig fest, indem Sie zuerst die blauen Stirnbänder und anschließend die unteren Bänder festziehen.