

ResMed | Healthcare

Einstellanleitung für AirMini™

1. Laden Sie zunächst die AirMini App aus dem AppStore (iOS) oder bei Google Play (Android) auf Ihr Smartphone oder Tablet.




2. Öffnen Sie die App und folgen Sie der Anleitung, um sich und Ihr AirMini zu registrieren.

3. Für die Einstellung des Gerätes fahren Sie wie folgt fort:

Die Parameter-Einstellung erfolgt im klinischen Menü:

Zugriff auf den klinischen Modus von der Startseite:

Halten Sie auf der Startseite einen Finger auf das ResMed-Logo und gleichzeitig 3 Sekunden lang einen Finger auf das AirMini-Logo.

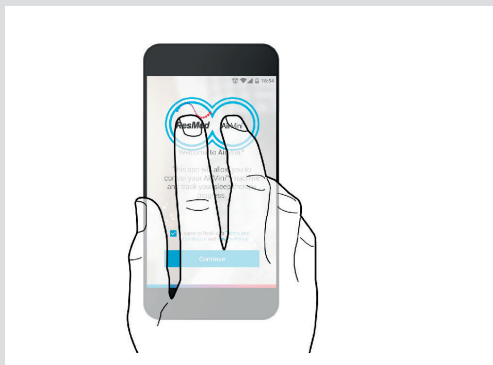

Hinweis: Diese Option ist nur sichtbar, solange die Nutzungsbedingungen noch nicht akzeptiert wurden.

Der klinische Modus wird geöffnet.


Hinweis: Bei der erstmaligen Geräteeinrichtung müssen Sie ein Smartphone über Bluetooth mit dem AirMini-Gerät koppeln und verbinden. Siehe *Verbindung des Geräts mit einem Smartphone* für weitere Informationen zum Koppeln.

Verlassen des klinischen Modus

Tippen Sie auf *Beenden* im Navigationsregister, um den klinischen Modus zu verlassen.

Zugriff auf den klinischen Modus vom Bluetooth-Bildschirm:

Halten Sie auf der Bluetoothseite einen Finger auf das ResMed-Logo und gleichzeitig 3 Sekunden lang einen Finger auf das AirMini-Logo.

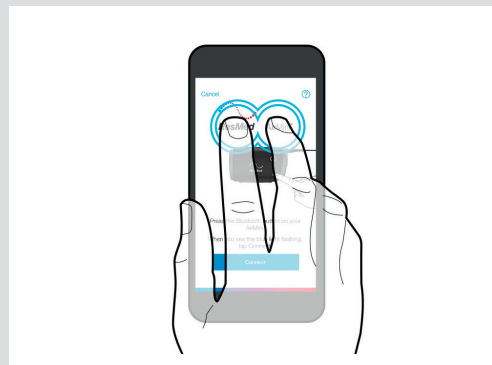

Hinweis: Tippen Sie oben rechts in der Ecke auf der Übersichtstafel auf das Bluetooth-Symbol, um den Bluetooth-Bildschirm zu öffnen.

4. Setzen Sie die Geräteparameter ausschließlich gemäß Ihrer ärztlichen Verordnung. **Weichen Sie nicht ohne Rücksprache mit Ihrem behandelnden Arzt von den vorgegebenen Verordnungsparametern ab.**

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die [ResMed Healthcare Hotline: 0800 2777000](tel:08002777000).
Ihr ResMed Healthcare Team